

# Informativo de Produto – ADERE

## FITA ADESIVA CREPE AUTO CLAVE

### 1042H

#### Características:

**Dorso:** Papel crepado tratado com solução base borracha

**Adesivo:** Base borracha e Resinas

**Cor:** Palha Claro

**Sinalizador:** Cor rosa para marrom escuro (Tarjas transversais no dorso da fita)

#### Embalagem:

Embalagem individual Plástica / Caixa de despacho

#### Dados Técnicos:

Adesão à placa de aço (gf / cm):	80 mín.
Tack Rolling Ball (cm):	10,0 máx.
Espessura (mm):	0,100 a 0,140
Resistência à Tração (Kgf / cm):	1,5 mín.
Alongamento (%):	4,0 mín.

#### Instruções de Uso:

Desenrole o tamanho necessário de fita e corte-o com uma tesoura. Aplicar a face aparente do adesivo exercendo pressão uniforme e constante sobre a superfície a ser fixada: ataduras, bandagem, identificação e podem ser utilizadas para fechar pacotes de esterilização. Ideal como indicador de esterilização nos recipientes hospitalares e odontológicos em Autoclave, até apresentar faixas escuras, após exposição desde 121°C até 140°C, conforme necessidade de ciclo de auto clavagem. A Fita 1042 H indica apenas que o material foi submetido ao processo de esterilização por pressão de vapor em autoclave mas não garante que a esterilização foi eficaz. Trata-se apenas de um sinalizador químico.

#### Estocagem:

Conservar o produto em sua embalagem original e em temperatura ambiente (15-30°C) e umidade relativa entre 30 a 60%. Armazenar longe de agentes esterilizantes. Armazenar em local coberto e seco. Produto sensível a luz solar. Validade 36 meses após a data de fabricação.

Emissão: 08/07/15	Revisão Nº 00	Aprovado:
Substitui: 00/00/00		Gerente Técnico

Quando impresso, serve apenas para consulta.



Adere Produtos Auto Adesivos Ltda  
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002  
Pq. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL  
CEP 13181-905

[www.adere.com](http://www.adere.com)

